

Návod k použití mobilního křesla –mechanického DH077600 – MK10



Dovozce: DANMARK - TRADE S.R.O.

Obsah

1. Přehled "Návod k použití"	1
2. Rozsah použití	1
3. Opatření pro bezpečné používání	1
4. Specifikace výrobku , názvy komponentů	3
5. Výkonnostní charakteristiky.....	5
6. Omezení při jízdě.....	5
7. Poznámky k instalaci	5
8. Návod k použití	9
9. Údržba a způsob údržby	12
10. Seznam dílů	12
11. Podmínky a metody skladování.....	13

1. Přehled "Návod k použití"

Tento návod k obsluze platí pro mobilní křeslo – mechanické – včetně informací o bezpečnostních opatřeních, popisech funkcí a údržbě různých modelů.

Grafika v této příručce slouží pouze pro informaci uživatele, odkazujeme na skutečný produkt ve skutečném použití.

2. Rozsah použití

Tento produkt je určen pro osoby se zdravotním postižením a nemohoucí osoby. Používá se k přemístování pacienta v rámci vnitřních prostor.

3. Opatření pro bezpečné použití

- Před použitím si pozorně přečtete „Opatření pro bezpečné použití“, abyste mohli tento výrobek správně používat.
- Pokud nebudete postupovat podle pokynů v části „Bezpečnostní opatření“, může dojít k poškození výrobku, zranění osob, a dokonce i ohrožení života.
- Obsluha by před použitím výrobku měla zcela porozumět návodu k použití.
- Není dovoleno ovládat výrobek malým dětem a lidem, kteří

nemohou porozumět bezpečnému používání mobilního křesla.
Každé opatření svým obsahem je důležité pro bezpečnost, a proto jej nezapomeňte dodržovat.

* Po přečtení návodu by měl být uschován na místě, kde je přístupný pro každého uživatele/operátora mobilního křesla.



UPOZORNĚNÍ

1. Před použitím musíte zkontrolovat, zda jsou součásti kompletní a zda jsou součásti pevně nainstalovány, aby bylo zajištěno bezpečné používání.
2. Před použitím nastavte vhodnou výšku a zajistěte, aby desky sedadla na obou stranách zůstaly ve stejné výšce.
3. Když uživatel sedí na mobilním křesle nebo jej opouští, nevstupuje na nožní pedál, nožní pedál se musí nejprve složit a pak lze stoupnout na zem, jinak může dojít k překlopení křesla.
4. Při používání mobilního křesla se ujistěte, že bezpečnostní zámek a bezpečnostní pás jsou uzamčeny.
5. Když uživatel sedí na mobilním křesle nebo jej opouští, musí být kola zablokována/zabrzděna.
6. Když uživatel sedí na mobilním křesle a hodlá se naklonit do předu, do stran či dozadu, věnujte prosím pozornost tomu, aby sklon těla nebyl příliš velký a nedošlo ke změně těžiště s následným převrácením křesla.

7. Uživatel se nesmí naklánět dopředu – například pro zvednutí předmětu ze země, protože hrozí nebezpečí pádu.
8. Při nastavování výšky sedáku musí být přední kola zajištěna.
9. Mobilní křeslo není určeno pro přepravu pacientů po schodech jinak hrozí nebezpečí úrazu a poškození výrobku.
10. Převážené mobilní křeslo je vhodné pro pohyb po rovné zemi, bez nerovností a překážek, aby se předešlo riziku převrácení.
11. Když je sklon podlahy větší než 5 stupňů, měla by obsluha mobilního křesla převážet pacienta tak, aby pacient byl čelem do kopce bez ohledu, zda jede nahoru či dolů. Jinak hrozí, že pacient se nakloní dopředu a spadne.
12. Při pobytu na svažitém terénu musí být všechna čtyři kola zablokována.
13. Brzdy čtyř kol překládacího křesla slouží pouze k brzdění, když jsou zaparkované. Nejedná se o brzdová zařízení a neměly by se používat ke zpomalování a brzdění během jízdy.
14. Mobilní křeslo nesmí být vystaveno přímému působení vody/vlhkosti (např. sprchování)

4. Specifikace výrobku, názvy komponentů




DH077600 (2) -46

délka	710 mm
šířka	600 mm
výška	790–990 mm
Velikost předních koleček	120 mm
Velikost zadních koleček	70 mm
Šířka sedadla	460 mm
Délka sedadla	400 mm
Výška sedadla od země	370–570 mm

Váha křesla	25.5 kg
Nosnost	120 kg

Tento výrobek se skládá ze základny, rámu levého sedadla, rámu pravého sedadla, z předních kolo průměru 12 cm a zadních kol o průměru 7 cm, nožních brzd atd. Materiál je svařen z vysokopevnostní ocele.

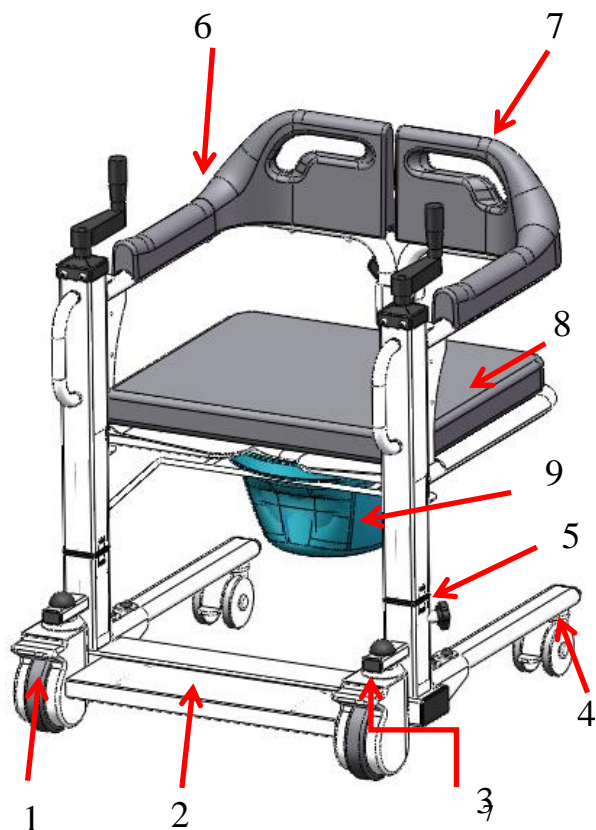

- 1 – 12 cm přední kolo
- 2 - opěrka nohou
- 3 - přední brzdy
- 4 – 7 cm zadní kolo
- 5 - polohovací rám
- 6 - levý rám sedadla
- 7 - pravý rám sedadla
- 8 - sedák
- 9 - nádoba

* Grafika v této příručce slouží pouze pro informaci uživatele, odkazujeme prosím na skutečný produkt ve skutečném použití.

5.Výkonnostní charakteristika


- Mobilní křeslo slouží k přemísťování osob s pohybovými obtížemi mezi postelí, židlí, pohovkou, WC atd.
- Mobilní křeslo nelze vystavovat přímému kontaktu s vodou a vlhkosti - např. při sprchování.
- Pohodlný mechanismus otevírání a zavírání sedáku usnadňuje operátorovi manipulaci uživatele a zabraňuje poškození zad operátora.
- Maximální zatížení je 120 kg, vhodné pro osoby všech postav.
- Nastavitelná výška sedadla slouží k vyrovnání různých výšek zařízení (postel, židle, WC atd.) .
- Lékařská tichá kola a kolové brzdy jsou stabilní a spolehlivé.
- Dvojité bezpečnostní provedení bezpečnostního zámku a bezpečnostního pásu zdvojnásobuje bezpečnost uživatelů.
- Speciální zesílený sedák slouží k pohodlnému sezení a potah sedáku lze sundat a vyprat.

6. Omezení při jízdě

Mobilní křeslo je určeno pro vnitřní použití s rychlostí pojezdu ≤ 3 km/h.


7. Návod na instalaci

1. Umístěte pravé plastové opěradlo na rám pravého sedadla a upevněte jej pomocí 4 šroubů M5 a obloukových podložek, jak je znázorněno na následujícím obrázku: (Rám levého sedadla se instaluje stejným způsobem)

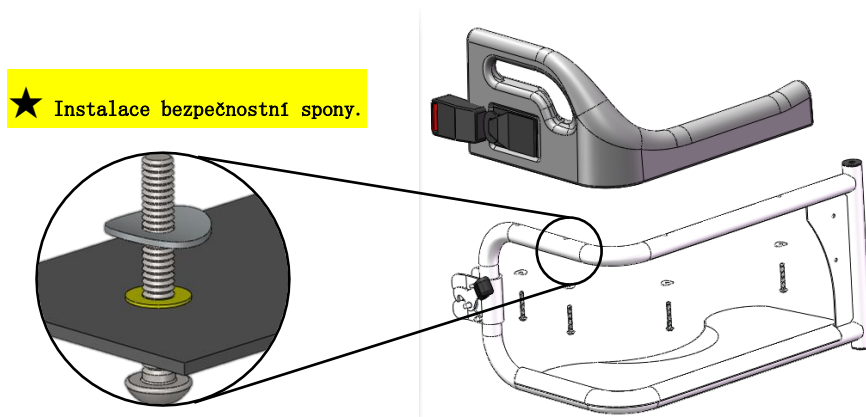


2. Umístěte díl s malými koly pod upínací štěrbinu základní části křesla a upevněte ji pomocí 4 šroubů M10, velké ploché podložky M10, ploché podložky M10 a kontramaticice M10, jak


je znázorněno na obrázku níže:

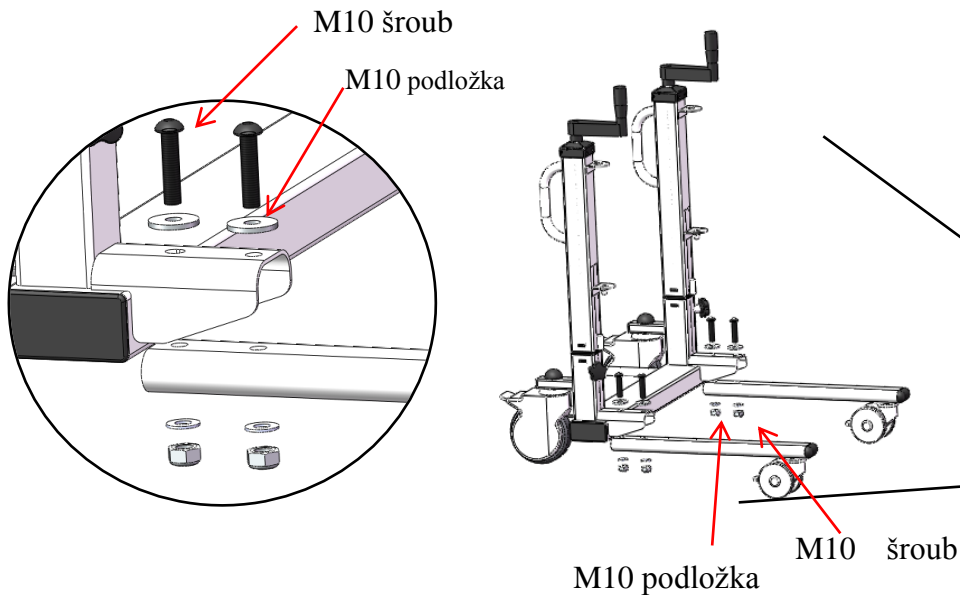

3. Pravý rám sedáku umístěte ke svislému sloupku, prostrčte ze shora šroub M8 a plochou podložkou a v dolní části vložte podložku a upevněte jej maticí M8, aby se rám sedadla neuvolnil a mohl se pružně otáčet, jak je znázorněno níže: (Levý nosič sedadel stejným způsobem).

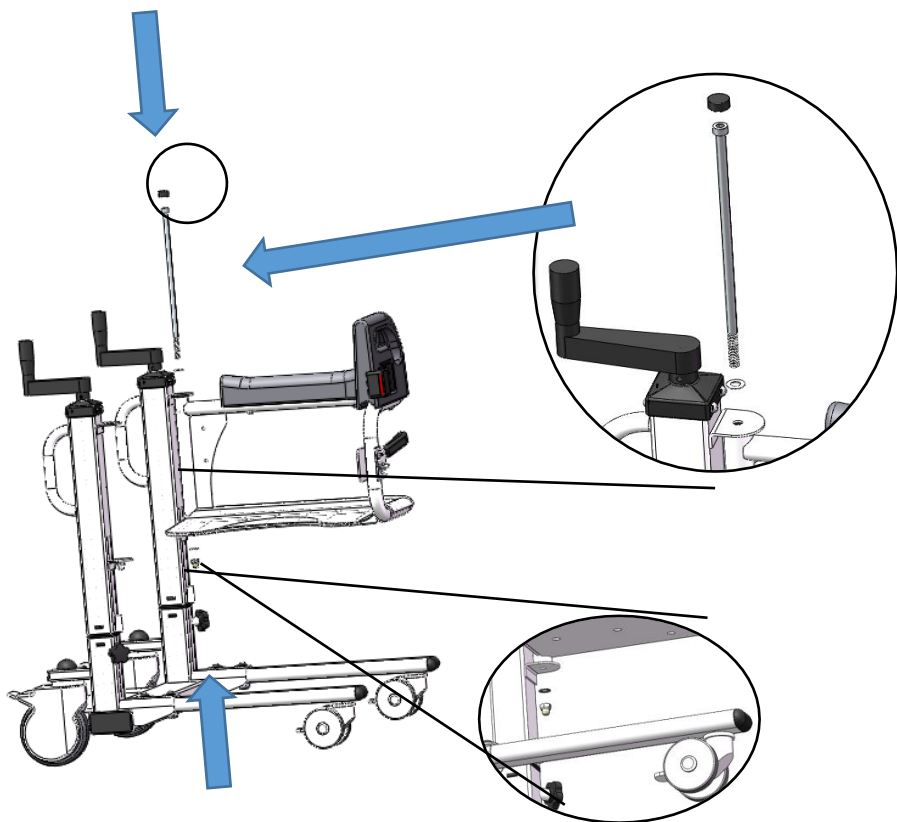

Pokud potřebujete použít toaletu, nejprve nainstalujte drátěný rám toalety do montážních otvorů dvou sloupků a poté toaletu nasuňte zezadu, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

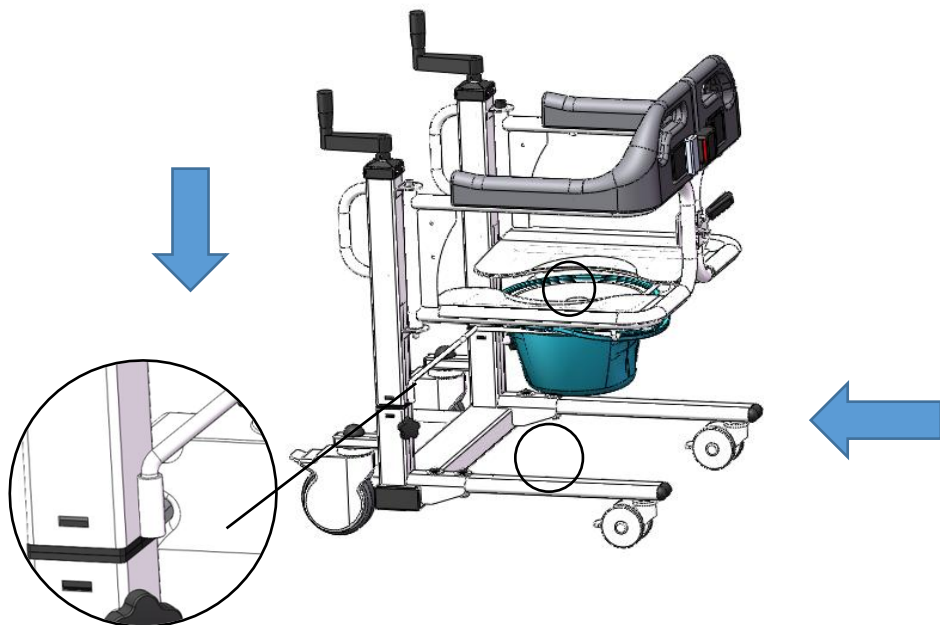

8.Návod k použití

Vysvětlené provozní kroky a způsob přesunu mezi různými druhy nábytku a zařízení zůstává stejný.

1. Uživatel sedí vzpřímeně a operátor nastaví výšku rámu sedadla mobilního křesla, aby spodní plocha rámu sedadla byla o něco výše než rovina židle;

2. Operátor otevře rám křesla na obou stranách a přesuňte jej před uživatele. Nastaví polohu mobilního křesla tak, aby těžiště těla uživatele bylo ve středu rámu sedadla. Znovu nastaví výšku rámu sedadla tak, aby se spodní část rámu sedadla mírně dotýkala roviny židle;
3. Zablokuje nožní brzdou obě přední velká kola, zvedne nohy uživatele a položí je na nožní opěrku;
4. Nechá uživatele střídavě naklánět tělo mírně ze strany na stranu, aby mohl současně podstrčit odpovídající boční rám, aby uživatele seděl na levém a pravém rámu mobilního křesla;
5. Když uživatel sedí na rámu sedadla úplně a rám levého a pravého sedadla je zcela



uzavřen, bezpečnostní zámek se automaticky uzamkne a operátor uzamkne bezpečnostní pás;

6. Uživatel si nastaví pohodlnou polohu při sezení a uchopí oběma rukama područky na obou stranách;
7. Operátor zkontroluje vzdálenost mezi spodním povrchem rámu sedadla mobilního křesla a židlí, zvedne rám sedadla o 2~3 cm, uvolní brzdu předních kol a pomalu přesune křeslo pryč ze židle.
8. Operátor tlačí na mobilní křeslo zezadu, aby se posunul k okraji lůžka;
9. Zkontrolujte výšku rámu sedáku mobilního křesla na okraji lůžka, abyste se ujistil, že spodní plocha rámu sedadla je o něco výše než matrace (pokud



potřebuje upravit výšku rámu sedadla, musí zabrzdit přední velká kola);

10. Operátor zcela zatlačí mobilní křeslo do předem určené polohy nemocničního lůžka, zabrzdí brzdy předních kol a znovu nastaví výšku rámu sedadla tak, aby se spodní plocha rámu sedadla mírně dotýkala matrace;

11. Postupně rozepne bezpečnostní pás a bezpečnostní zámek za opěradlem mobilního křesla, pomalu otevře rám levého a pravého sedadla tak, aby boky uživatele seděly na matraci;

12. Operátor uvolní brzdy na předních kolech, zvedne nohy uživatele a přesune mobilní křeslo od lůžka.



9. Údržba a způsob údržby

- Nepoškrábejte povrch produktu tvrdými předměty, aby nedošlo k poškození materiálu;
- Ke každodennímu čištění a údržba používejte neutrální syntetický čisticí prostředek. Prostředek pak otřete vlhkým hadříkem a poté otřete suchým hadříkem;
- Nevystavujte výrobek silným kyselinám a zásaditým prostředkům, vodě a vlhkosti, aby nedošlo ke korozi.
- Pravidelně kontrolujte uvolněné matice a šrouby, poškozené nebo zlomené díly a v případě potřeby poškozené díly vyměňte.

10. Seznam dílů

Po otevření krabice si prosím zkontrolujte následující díly a příslušenství:

Pořadové číslo	Název	Specifikace	Množství
1	Základna	set	1
2	Díl s malými koly	set	2
3	Konstrukce levého sedáku	set	1
4	Konstrukce pravého sedáku	set	1
5	Plastová nádoba	set	1
6	Držák na nádobu	kus	1

7	Polštář na sedačku	kus	1
8	Sada nářadí	set	1
9	Spojovací materiál	set	1
10	Instrukce	kus	1

11.Podmínky a způsoby skladování

Zabalené produkty by měly být skladovány v místnosti s teplotou nepřesahující rozmezí 0°C~40°C, relativní vlhkostí nepřesahující 80 %, bez korozivních plynů a v dobře větrané a čisté místnosti. Během přepravy by měl být chráněn před vlhkostí, světlem a zdroji tepla.